

MEMOGUIDE

Armoires Pyxis

PROCEDURE D'URGENCE



En cas de problème

Entre 7h30 et 18h en semaine veuillez
contacter : Le service biomédical

Pour une question non urgente via l'application :
AssetPlus Web

Pour une question urgente : 058 773 66 12

Entre 18h et 7h30 et le week-end veuillez
contacter : La pharmacie

Pharmacien de piquet à domicile : 058 773 09 88

Support Email: Pour la Suisse :

GMB-CH-PYXIS-SUPPORT@bd.com

1. Ouverture d'urgence des portes


1. PROCUREZ-VOUS les clés d'ouverture
(2 clés : 1 droite et 1 gauche)
A définir avec le service

2. Mettez les clés dans la serrure comme suit, les
serrures se trouvent en haut devant

3. Armoire

→ «GAUCHE» sur la serrure de gauche

→ «DROITE» sur la serrure de droite

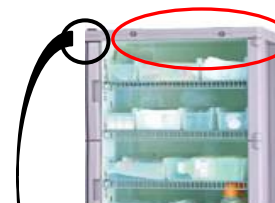

4. Poussez le loquet noir vers le haut afin de libérer les
portes

5. Les portes se libèrent, vous avez accès aux produits

6. Pour refermer les portes, le loquet doit être de
nouveau positionné vers le bas.

7. Refermez simplement les portes une à une.

2. Ouverture d'urgence du réfrigérateur

1. PROCUREZ-VOUS les clés d'ouverture (2clés : 1 droite et 1 gauche)
A définir avec le service

2. Utilisez la clé «Réfrigérateur»



Ouverture d'un tiroir matriciel
(poussez vers le haut le loquet rouge)



Bouton d'ouverture des CUBIES du HAUT
(de ce tiroir)

Lorsque ces boutons sont appuyés, les cubies s'ouvrent tous les uns après les autres (env. 10 sec entre chaque)

Bouton d'ouverture des CUBIES du BAS
(de ce tiroir)

3. Ouverture d'urgence des tiroirs


1. PROCUREZ-VOUS les clés d'ouverture
(2 clés : 1 droite et 1 gauche)
A définir avec le service

2. Mettez les clés dans la serrure comme suit, les serrures se trouvent derrière l'armoire

3. Medstation (MED) ou Auxiliaire (AUX)

→ «clef GAUCHE» sur la serrure de gauche

→ «clef DROITE» sur la serrure de droite

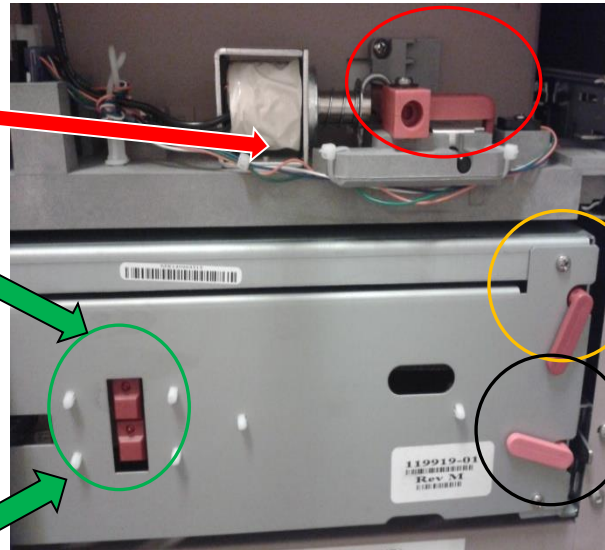

4. Si malgré cela, les cubies ne s'ouvrent toujours pas (ex : aucune alimentation électrique...), alors le cubie doit être ouvert manuellement en faisant levier sur le mécanisme.



ATTENTION

**N'OUVRIRE QUE LE CUBIE CONCERNÉ
CAR CETTE ACTION
DETRUIT LE MECANISME
DE FACON IRREVERSIBLE**

(cf liste de tous les produits et leurs emplacements respectifs)

Ouverture du TIROIR du HAUT (cubies)



Ouverture du TIROIR du BAS (cubies)